
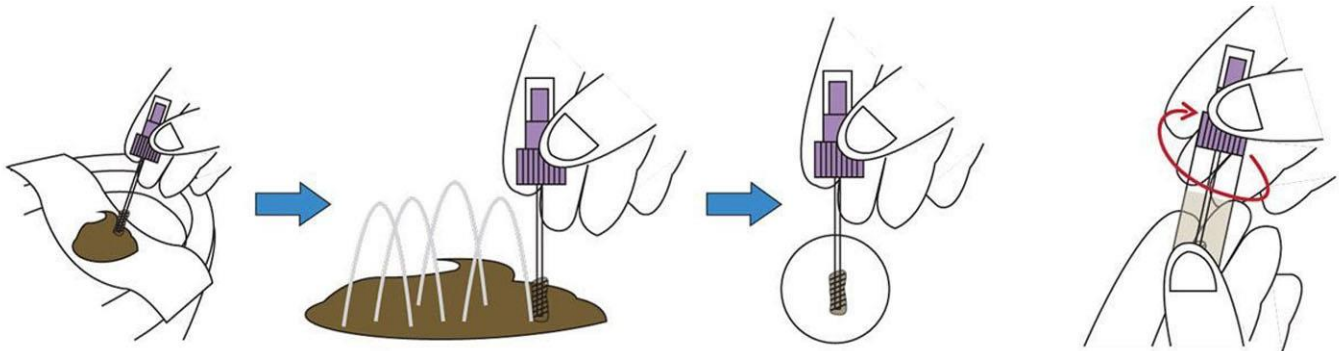



Petunjuk Pemakaian

- Letakkan beberapa helai tisyu Scotti di bagian bawah kursi toilet seperti yang tertera di gambar.
- Turunkan bagian atas kursi toilet untuk menjepit tisyu supaya tidak bergerak.
- Jagalah supaya tisyu tetap kering dan tidak terkena air.
- Buang air besar di atas tisyu.

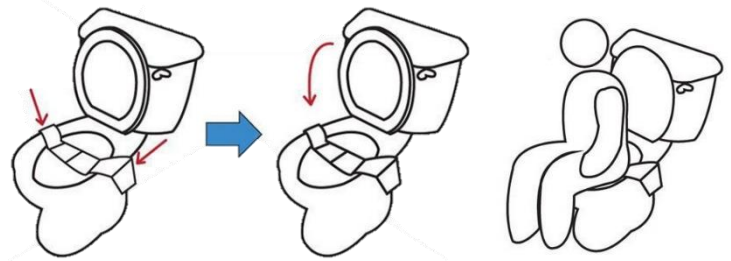

- Buka tutup bagian atas tabung dan keluarkan stik aplikat.
- Tusukkan spiral aplikator ke **enam daerah yang berbeda** pada tinja anda.
- Masukkan kembali aplikator ke dalam tabung dan tutup rapat.

Masukkan tabung yang berisi tinja ke dalam amplop dan segel amplop dengan lem. Bawalah amplop tersebut ke klinik dan berikan kepada Ronnie atau salah satu petugas sukarelawan di klinik.

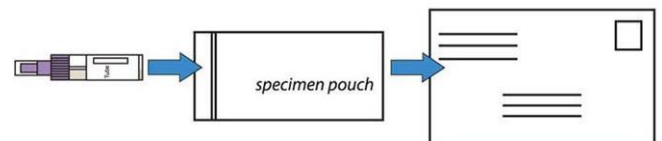

Jangan lupa menulis nama lengkap dan tanggal lahir anda di amplop.